

BABIX[®]




U-förmige BABIX[®]-Hülle

Die BABIX[®]-Hüllen sind Hilfseinrichtungen für die Röntgenuntersuchungen an Säuglingen und Kleinstkindern. In den BABIX[®]-Hüllen können Säuglinge und Kleinstkinder für die Röntgenuntersuchung vorbereitet werden. Während der Untersuchung sind die Patienten in den Hüllen gut fixiert, ohne dass sich eine oder mehrere Personen zum Festhalten im unmittelbaren Strahlungsbereich aufhalten müssen. Die BABIX[®]-Hüllen können wahlweise hängend an einem Untersuchungsgerät, z. B. für Thorax- oder Abdomenaufnahmen oder liegend auf einem Bucky-Tisch, z. B. für Aufnahmen der Wirbelsäule in jede gewünschte Aufnahmeposition gebracht werden.



BABIX[®]-Hülle auf BABIX[®]-Spanner

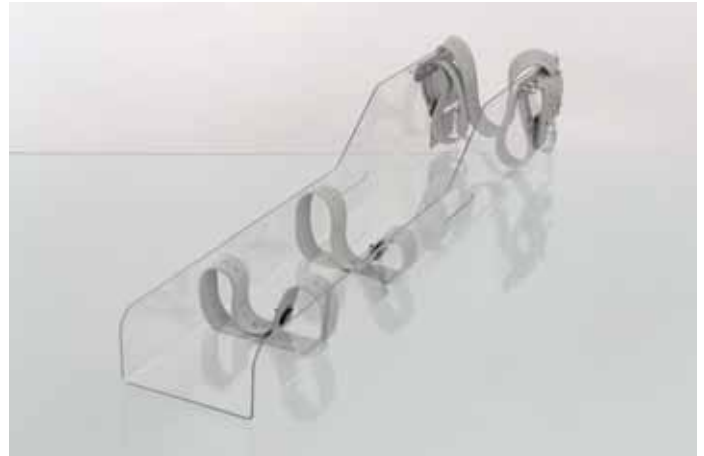

flachförmige BABIX[®]-Hülle

BABIX[®]-Hüllen gibt es in zwei Ausführungen: U-förmige und flachförmige für Aufnahmen im Liegen und im Hängen. Die BABIX[®]-Hüllen bestehen aus einem durchsichtigen, röntgenstrahlentransparenten Material. Am oberen Ende ist ein Bügel befestigt, mit dem die Hülle in die Haltevorrichtung eingehängt werden kann.

Beide Ausführungen sind in bis zu fünf Größen lieferbar. Zur Aufbewahrung der BABIX[®]-Hüllen empfiehlt es sich, diese nach Gebrauch in BABIX[®]-Spannern aufzubewahren. Diese an die Wand zu montierenden BABIX[®]-Spanner gibt es für beide Ausführungen der BABIX[®]-Hülle.

Besondere Merkmale

- Praktische Patienten-Vorbereitung
- Kurze Einrichtungszeit
- Rationeller Untersuchungsablauf
- Sichere Fixierung und definierte Lagerung
- Absoluter Strahlenschutz für Personal
- Kein Aufenthalt im Strahlungsbereich
- Universelle Anwendung
- Einfache Reinigung
- Verschiedene Hüllen-Abmessungen
- BABIX[®]-Spanner zur praktischen Aufbewahrung

BABIX [®] -Hülle U-förmig		
Größe	a (Breite)	b (Länge)
I	100 mm	500 mm
II	110 mm	600 mm
III	125 mm	700 mm
IV	165 mm	900 mm

BABIX [®] -Hülle flachförmig		
Größe	a (Breite)	b (Länge)
II	110 mm	600 mm
III	125 mm	700 mm
IIIA	145 mm	800 mm

BABIX[®]

Gonadenschutzhöschen (Set)

Patientenschutzmittel für die Pädiatrie bei Röntgenaufnahmen in der medizinischen Diagnostik mit einem Pb-Wert von 1,00 mm. Das Gonadenschutzhöschen sorgt komfortabel für den vollständigen Schutz der Gonaden Ihrer kleinsten Patienten. Der praktikable Klettverschluss erlaubt ein leichtes und schnelles An- und Ablegen sowie eine bequeme Größenanpassung.

- Leicht und schnell anzulegen
- Bequeme Größenanpassung
- Größensatz mit je einem Höschen für Säuglinge bis Kleinkinder (0-1 Jahr), (1-3 Jahre) und (3-6 Jahre)



Gonadenschutzhöschen

Ovarienschutz mit Gürtel

Der Patientenschutz schützt bei Röntgenaufnahmen stehender Patientinnen die Ovarien. Der Stretchgürtel mit Schnappverschluss gewährleistet ein leichtes An- und Ablegen und eine bequeme Größenanpassung.

- Schutz mit einem Bleigleichwert von Pb 1,00 mm
- Gürtel mit Hygienefutteral
- Leicht und schnell anzulegen
- Bequeme Größenanpassung über den Stretchgürtel
- Set bestehend aus dem Gürtel und je einem Protektor in den Größen: Small, Medium, Large

Patientenschutzmittel für die Pädiatrie und bei Röntgenaufnahmen in der medizinischen Diagnostik: Auch für Kinder ist der Ovarienschutz im Set erhältlich.



Ovarienschutz



Bohm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich

Tel.: 02275/ 20005
Fax.: 02275/ 20006

office@boehm-medical.at
www.boehm-medical.at